

Myt-3D Kontrollblut / Sang de contrôle Lot. B0224N

Exp.: 05.05.2024

Mythic 18

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.6	1.0			
LYM #	1.7	0.6	LYM %	22.0	7.0
MON #	1.0	0.6	MON %	13.0	7.0
GRA #	4.9	0.5	GRA%	65.0	6.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.44	0.24	HGB g/dl	13.6	0.6
HCT %	38.0	2.0	MCV fl	85.5	5.0
MCH pg	30.6	2.5	MCHC	35.8	3.0
RDW %	15.5	3.0	RDWs fl	40.0	6.0
PLT 10 ³ /ul	274	40	MPV fl	8.2	3.0
PCT %	0.215	0.050	PDW %	15.5	4.0
PLCR %	13.5	6.0			

Samsung HC10

	Sollwert	Bereich		Sollwert	Bereich
LEU 10 ⁹ /l	7.6	1.0	PDWs fl	11.6	4.0
ERY 10 ⁹ /l	4.44	0.24	PDWc %	38.2	4.0
HGB g/dl	13.6	0.6	RDWs fl	54.0	6.0
HCT %	40.52	2.0	RDWc %	19.0	3.0
MCV fl	91.5	5.0	LYM	2.39	0.6
MCH pg	30.0	2.5	MON	0.61	0.5
MCHC	33.5	3	GRA	4.60	0.6
PLT 10 ⁹ /l	294	40	LYM %	31.5	7.0
PCT %	0.200	0.05	MON %	8.0	7.0
MPV fl	7.8	3.0	GRA %	60.5	7.0

Z3 CRP

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	8.4	1.0	MCH pg	31.6	2.5
LYM #	2.76	0.6	MCHC	35.2	3
MID #	0.66	0.5	RDW-CV %	14.8	3.0
GRA #	4.98	0.6	RDW-SD fl	44.6	6.0
LYM %	32.8	7.0	PLT 10 ³ /ul	294	40
MID %	7.9	5.7	MPV fl l	9.5	3.0
GRA %	59.3	7.0	PDW	16.6	4.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.44	0.24	PCT	0.278	0.100
HGB g/dl	14.0	0.6	P-LCC	66	22
HCT %	39.7	2.0	P-LCR %	22.6	6.0
MCV fl	89.6	5.0			

Gebrauchsanweisung:

- Kontrollblut vor dem Mischen 15 Minuten bei Zimmertemperatur aufbewahren.

Kontrollblut NIE kalt auf mechanischen Mischer legen !! Blut nie kalt mischen!
- Kontrollblut für ca. 30 Sek. zwischen den Handflächen hin- und herrollen und gelegentlich wenden. Kräftig mischen aber nicht schütteln!
- So lange mischen bis die roten Blutkörperchen komplett suspendiert sind. Röhrchen, welche lange gelagert wurden, müssen eventuell etwas länger gemischt werden.
- Unmittelbar vor der Messung sollte das Röhrchen 30 - 40 Mal vorsichtig gekippt werden.
- Messung durchführen.
- Deckel und Gewinde des Röhrchens reinigen.
- Kontrollblut spätestens nach 30 Minuten in den Kühlschrank zurücklegen.

Kontrollblut ist nach Öffnungsdatum 2 Wochen haltbar.

Procédure:

- Tempérer le sang de contrôle 15 minutes à température ambiante avant de le mélanger.

Prière de ne pas utiliser un mélangeur mécanique! Ne jamais mélanger le sang de contrôle encore froid.
- Faire rouler le tube de sang de contrôle entre les deux paumes des mains pendant environ 30 sec. puis le retourner quelques fois verticalement. Mélanger soigneusement sans secouer.
- Un sang de contrôle bien mélangé est homogène, toutes les cellules sont en suspension dans le liquide.
- Mélanger le tube plus longtemps si nécessaire.
- Exécuter l'analyse sans attendre.
- Essuyer avec un tampon les restes de sang dans le bouchon et le bord du tube.
- Remettre le sang de contrôle au réfrigérateur dans un délai de 30 minutes.

Le sang de contrôle se garde pendant 2 semaines après l'ouverture