


Z3 CRP Mode d'emploi pour le téléchargement CRP

1. Brancher une clé USB vide à l'ordinateur.
2. Enregistrer le dossier jaune „qc“ sur la clé USB, voir l'image ci-dessous:

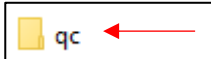

3. Retirer la clé USB de l'ordinateur.
4. Brancher la clé USB à l'arrière de l'appareil.
5. Sélectionner **CQ** sur l'appareil.
6. Accéder aux **Réglage**.
7. Sélectionner **Nv.** (Nouveau).
8. Régler le **mode sur WB-CRP**.
9. Sélectionner **Importer**.
10. Choisir le niveau **Haut** ou **Bas**.
11. Confirmer avec **OK**.
12. Toutes les données sont désormais automatiquement transférées depuis la clé USB.
13. Sélectionner **Garder**.
14. Enfin, confirmer en cliquant sur **OK**.

Important: Le mode doit impérativement être réglé sur **WB-CRP**.

Sinon, le numéro de lot et la date de péremption seront bien transférés, mais pas les valeurs **cibles** et les **limites**!

Seulement en mode **WB-CRP**, toutes les informations sont entièrement transférées depuis la clé USB.