


Z3 CRP Anleitung CRP Download

1. Einen leeren USB-Stick an den PC anschliessen.
2. Den gelben Ordner „qc“ auf dem USB-Stick speichern, siehe Bild unten:

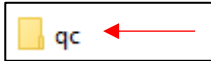

3. USB-Stick vom Computer entfernen.
4. USB-Stick an der Rückseite des Geräts anschliessen.
5. Am Gerät **QC** auswählen.
6. **Einstellungen / Settings** aufrufen.
7. **Neu / New** auswählen.
8. Den **Modus auf Vollblut-CRP** einstellen.
9. **Importieren** auswählen.
10. **High** oder **Low** wählen
11. Mit **OK** bestätigen.
12. Alle Daten werden nun automatisch vom USB-Stick übernommen.
13. **Speichern / Save** auswählen.
14. Abschliessend mit **OK** bestätigen.

Wichtig: Der **Modus muss unbedingt auf „Vollblut-CRP“** eingestellt sein.

Andernfalls werden zwar Lot-Nummer und Verfallsdatum übernommen, **jedoch nicht die Zielwerte und Grenzwerte!**

Nur im Modus „Vollblut-CRP“ erfolgt eine vollständige Übernahme aller Angaben vom USB-Stick.