


## Z3 CRP Anleitung CRP Download DE

1. Einen leeren USB-Stick an den PC anschliessen.
2. Den gelben Ordner „qc“ auf dem USB-Stick speichern, siehe Bild unten:

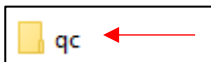

3. USB-Stick vom Computer entfernen.
4. USB-Stick an der Rückseite des Geräts anschliessen.
5. Am Gerät **QC** auswählen.
6. **Einstellungen / Settings** aufrufen.
7. **Neu / New** auswählen.
8. Den **Modus auf Vollblut-CRP** einstellen.
9. **Importieren** auswählen.
10. **High** oder **Low** wählen
11. Mit **OK** bestätigen.
12. Alle Daten werden nun automatisch vom USB-Stick übernommen.
13. **Speichern / Save** auswählen.
14. Abschliessend mit **OK** bestätigen.

**Wichtig:** Der **Modus muss unbedingt auf „Vollblut-CRP“** eingestellt sein.


Andernfalls werden zwar Lot-Nummer und Verfallsdatum übernommen, **jedoch nicht die Zielwerte und Grenzwerte!**

Nur im Modus „Vollblut-CRP“ erfolgt eine vollständige Übernahme aller Angaben vom USB-Stick.

---

## Z3 CRP Mode d'emploi pour le téléchargement CRP FR

1. Brancher une clé USB vide à l'ordinateur.
2. Enregistrer le dossier jaune „qc“ sur la clé USB, voir l'image ci-dessous:

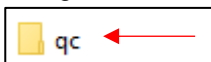

3. Retirer la clé USB de l'ordinateur.
4. Brancher la clé USB à l'arrière de l'appareil.
5. Sélectionner **CQ** sur l'appareil.
6. Accéder aux **Réglage**.
7. Sélectionner **Nv.** (Nouveau).
8. Régler le **mode sur WB-CRP**.
9. Sélectionner **Importer**.
10. Choisir le niveau **Haut** ou **Bas**.
11. Confirmer avec **OK**.
12. Toutes les données sont désormais automatiquement transférées depuis la clé USB.
13. Sélectionner **Garder**.
14. Enfin, confirmer en cliquant sur **OK**.

**Important:** Le mode doit impérativement être réglé sur **WB-CRP**.

Sinon, le numéro de lot et la date de péremption seront bien transférés, mais pas les valeurs **cibles** et les **limites!**

Seulement en mode **WB-CRP**, toutes les informations sont entièrement transférées depuis la clé USB.