

Myt-3D Kontrollblut / Sang de contrôle Lot. B0822N

Exp.: 05.11.2022

Mythic 18

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.7	1.0			
LYM #	2.1	0.6	LYM %	27	7.0
MON #	0.7	0.5	MON %	9	5.0
GRA #	4.90	0.6	GRA%	64	7.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.53	0.24	HGB g/dl	13.5	0.6
HCT %	38.1	2.0	MCV fl	84.0	5.0
MCH pg	29.8	2.5	MCHC	35.5	3.0
RDW %	15.5	3.0	RDWs fl	45.0	6.0
PLT 10 ³ /ul	275	40	MPV fl	8.5	3.0
PCT %	0.230	0.050	PDW %	17.0	4.0
PLCR %	14.5	6.0			

Samsung HC10

	Sollwert	Bereich		Sollwert	Bereich
LEU 10 ⁹ /l	8.05	1.0	PDWs fl	12.4	4.0
ERY 10 ⁹ /l	4.46	0.24	PDWc %	39.6	4.0
HGB g/dl	13.5	0.6	RDWs fl	48.9	6.0
HCT %	39.45	2.0	RDWc %	16.9	3.0
MCV fl	88.0	5.0	LYM	2.64	0.6
MCH pg	30.3	2.5	MON	0.61	0.4
MCHC	34.3	3	GRA	4.80	0.6
PLT 10 ⁹ /l	258	40	LYM %	32.8	7.0
PCT %	0.230	0.05	MON %	7.6	5.0
MPV fl	8.8	3.0	GRA %	59.6	7.0

Z3 CRP

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.98	1.00	MCH pg	30.8	2.5
LYM #	2.66	0.60	MCHC	34.7	3
MID #	0.52	0.52	RDW-CV %	16.5	3.0
GRA #	4.80	0.60	RDW-SD fl	48.0	6.0
LYM %	33.3	7.0	PLT 10 ³ /ul	292	40
MID %	6.5	6.5	MPV fl l	10.4	3.0
GRA %	60.2	7.0	PDW	16.5	4.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.37	0.24	PCT	0.303	0.100
HGB g/dl	13.5	0.6	P-LCC	82	22
HCT %	38.8	2.0	P-LCR %	28.2	6.0
MCV fl	88.8	5.0			

Gebrauchsanweisung:

- Kontrollblut vor dem Mischen 15 Minuten bei Zimmertemperatur aufbewahren.
Kontrollblut NIE kalt auf mechanischen Mischer legen !! Blut nie kalt mischen!
- Kontrollblut für ca. 30 Sek. zwischen den Handflächen hin- und herrollen und gelegentlich wenden. Kräftig mischen aber nicht schütteln!
- So lange mischen bis die roten Blutkörperchen komplett suspendiert sind. Röhrchen, welche lange gelagert wurden, müssen eventuell etwas länger gemischt werden.
- Unmittelbar vor der Messung sollte das Röhrchen 30 - 40 Mal vorsichtig gekippt werden.
- Messung durchführen.
- Deckel und Gewinde des Röhrchens reinigen.
- Kontrollblut spätestens nach 30 Minuten in den Kühlschrank zurücklegen.

Kontrollblut ist nach Öffnungsdatum 2 Wochen haltbar.

Procédure:

- Tempérer le sang de contrôle 15 minutes à température ambiante avant de le mélanger.
Prière de ne pas utiliser un mélangeur mécanique! Ne jamais mélanger le sang de contrôle encore froid.
- Faire rouler le tube de sang de contrôle entre les deux paumes des mains pendant environ 30 sec. puis le retourner quelques fois verticalement. Mélanger soigneusement sans secouer.
- Un sang de contrôle bien mélangé est homogène, toutes les cellules sont en suspension dans le liquide.
- Mélanger le tube plus longtemps si nécessaire.
- Exécuter l'analyse sans attendre.
- Essuyer avec un tampon les restes de sang dans le bouchon et le bord du tube.
- Remettre le sang de contrôle au réfrigérateur dans un délai de 30 minutes.

Le sang de contrôle se garde pendant 2 semaines après l'ouverture