

Myt-3D Kontrollblut / Sang de contrôle Lot. B0223N

Exp.: 05.05.2023

Mythic 18

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.9	1.0			
LYM #	2.4	0.6	LYM %	30.5	7.0
MON #	0.6	0.5	MON %	7.0	5.0
GRA #	4.9	0.6	GRA%	62.5	7.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.46	0.24	HGB g/dl	13.5	0.6
HCT %	39.0	2.0	MCV fl	87.4	5.0
MCH pg	30.3	2.5	MCHC	34.6	3.0
RDW %	15.5	3.0	RDWs fl	42.0	6.0
PLT 10 ³ /ul	263	40	MPV fl	8.2	3.0
PCT %	0.210	0.050	PDW %	15.0	4.0
PLCR %	15.0	6.0			

Samsung HC10

	Sollwert	Bereich		Sollwert	Bereich
LEU 10 ⁹ /l	7.9	1.0	PDWs fl	12.8	4.0
ERY 10 ⁹ /l	4.46	0.24	PDWc %	41.0	4.0
HGB g/dl	13.5	0.6	RDWs fl	49.0	6.0
HCT %	40.5	2.0	RDWc %	17.0	3.0
MCV fl	90.8	5.0	LYM	2.5	0.6
MCH pg	30.3	2.5	MON	0.6	0.4
MCHC	33.3	3	GRA	4.8	0.6
PLT 10 ⁹ /l	263	40	LYM %	32	7.0
PCT %	0.25	0.05	MON %	8.0	5.0
MPV fl	8.2	3.0	GRA %	60.0	7.0

Z3 CRP

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.9	1.00	MCH pg	30.3	2.5
LYM #	2.4	0.60	MCHC	33.3	3
MID #	0.6	0.46	RDW-CV %	17.0	3.0
GRA #	4.9	0.60	RDW-SD fl	51.0	6.0
LYM %	30.5	7.0	PLT 10 ³ /ul	263	40
MID %	7.0	5.7	MPV fl l	8.2	3.0
GRA %	62.5	7.0	PDW	15.0	4.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.46	0.24	PCT	0.25	0.100
HGB g/dl	13.5	0.6	P-LCC	76	22
HCT %	40.5	2.0	P-LCR %	27.0	6.0
MCV fl	90.8	5.0			

Gebrauchsanweisung:

- Kontrollblut vor dem Mischen 15 Minuten bei Zimmertemperatur aufbewahren.

*Kontrollblut NIE kalt auf mechanischen Mischer legen !!
Blut nie kalt mischen!*
- Kontrollblut für ca. 30 Sek. zwischen den Handflächen hin- und herrollen und gelegentlich wenden. Kräftig mischen aber nicht schütteln!
- So lange mischen bis die roten Blutkörperchen komplett suspendiert sind. Röhrchen, welche lange gelagert wurden, müssen eventuell etwas länger gemischt werden.
- Unmittelbar vor der Messung sollte das Röhrchen 30 - 40 Mal vorsichtig gekippt werden.
- Messung durchführen.
- Deckel und Gewinde des Röhrchens reinigen.
- Kontrollblut spätestens nach 30 Minuten in den Kühlschrank zurücklegen.

Kontrollblut ist nach Öffnungsdatum 2 Wochen haltbar.

Procédure:

- Tempérer le sang de contrôle 15 minutes à température ambiante avant de le mélanger.

*Prière de ne pas utiliser un mélangeur mécanique!
Ne jamais mélanger le sang de contrôle encore froid.*
- Faire rouler le tube de sang de contrôle entre les deux paumes des mains pendant environ 30 sec. puis le retourner quelques fois verticalement. Mélanger soigneusement sans secouer.
- Un sang de contrôle bien mélangé est homogène, toutes les cellules sont en suspension dans le liquide.
- Mélanger le tube plus longtemps si nécessaire.
- Exécuter l'analyse sans attendre.
- Essuyer avec un tampon les restes de sang dans le bouchon et le bord du tube.
- Remettre le sang de contrôle au réfrigérateur dans un délai de 30 minutes.

Le sang de contrôle se garde pendant 2 semaines après l'ouverture