

Dri-Chem NX600i Recommandation de nettoyage
A effectuer et à signer régulièrement

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin.	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Date / Visa:												
Vérification niveau plaque de référence et noter le niveau Une fois par mois												
Heures de la lampe: noter Une fois par mois <i>Arrêter l'appareil</i>												
Dépoussiérer l'appareil complètement Une fois par mois												
Nettoyer les racks d'échantillons et le rack à pointes Une fois par mois												
Filtre à air Une fois par mois												
Unité d'application d'échantillon et l'unité ISE Une fois par mois												
Le bouchon de fluide de référence Une fois par mois												
Joint torique de l'échantillonneur Une fois par mois												
Incubateur Plaque de référence Photomètre Vérification niveau plaque de référence Une fois tous les 3 mois												