

Communication importante : Mise à jour du firmware pour l'AFIAS-3 Version AA3.WW.01.04.00



6

AFIAS-3
Port USB à droite
de l'appareil

Glattbrugg, avril 2025

Nouvelle mise à jour du firmware pour l'AFIAS-3

Une nouvelle mise à jour du firmware est disponible pour l'analyseur immunologique AFIAS-3. Celle-ci est importante pour améliorer la qualité et la fiabilité de vos mesures (notamment pour l'HbA1c et les D-dimères).



Veillez installer la mise à jour dès que possible. L'installation ne vous prendra que 2 à 3 minutes. Gardez à cet effet une clé USB vide à portée de main.

Pour télécharger le nouveau logiciel, procédez d'abord comme suit :

- 1 Ouvrez le site Internet de Polymed www.polymed.ch/fr/telechargements/
- 2 Rendez-vous dans **LABORATOIRE > AFIAS > Firmware AFIAS-3.**
- 3 Téléchargez le fichier ZIP.
- 4 Ouvrez le fichier téléchargé.
- 5 Sauvegardez le dossier boditech sur la clé USB (vide).
- 6 Insérez la clé USB sur la droite de l'appareil AFIAS-3 (voir image ci-dessus).

Procédez ensuite à la mise à jour sur l'AFIAS-3 :



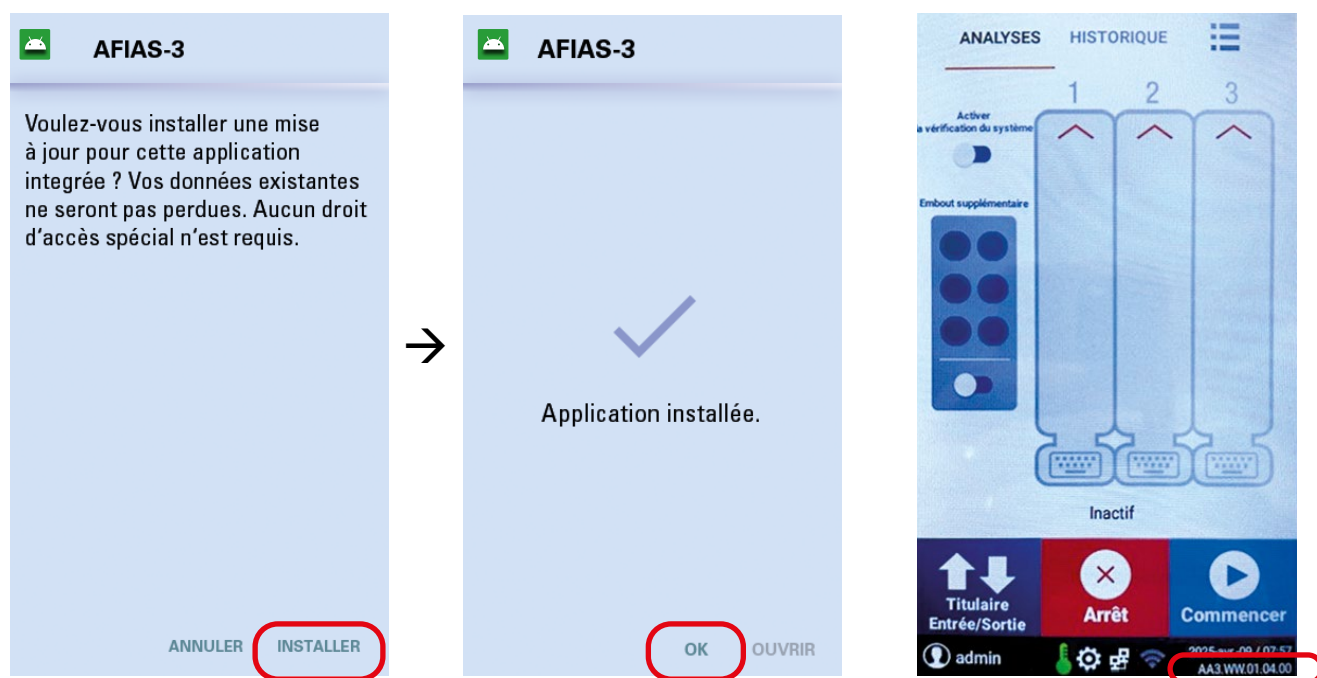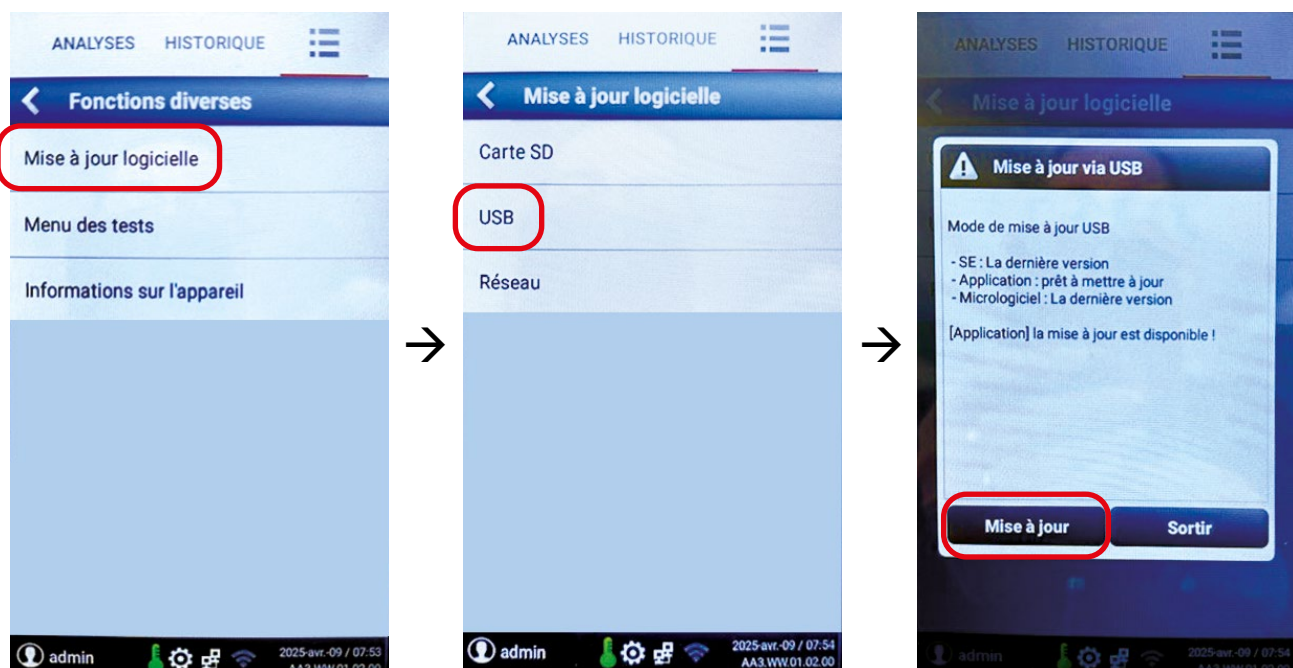

La mise à jour est alors effectuée. **Ce processus dure environ 1 minute.** Après le redémarrage automatique, connectez-vous comme d'habitude.

La nouvelle version du logiciel devrait maintenant figurer en bas à droite de l'écran :

AA3.WW.01.04.00